



Opća bolnica Pula
Ospedale Generale di Pola
Odjel za medicinsko biokemijsku djelatnost

UPUTE ZA NEPRIHVAĆANJE UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA

Uzorak biološkog materijala neće se prihvatiti za analiziranje u slijedećim situacijama:

1. bolesnik nije pravilno pripremljen za uzimanje uzorka
2. uzorak krvi nije uzet u odgovarajuće epruvete ovisno o traženim pretragama, pri čemu treba strogo paziti i na količinu uzete krvi (do označene razine)
3. svaki uzorak dopremljen u laboratorij, dostavljen ili se uzima u laboratoriju, a nije pravilno označen, te nema odgovarajuću (jednako označenu), čitko i pravilno ispisanu uputnicu s točnim vremenom uzimanja uzorka
4. ne prihvaćaju se zgrušani uzorci krvi uzeti u epruvete s antikoagulansom
5. epruvete bez antikoagulansa moraju biti dostavljene u laboratorij u odgovarajućem položaju (krv nije u dodiru s čepom) i ne smiju se miješati (hemoliza)
6. uzorci mokraće ne smiju se prenositi u epruvetama s gelom
7. ne prihvaćaju se uzorci za koje je prošlo dozvoljeno vrijeme od uzimanja do dostave u laboratorij
8. hemolitični uzorci (hemoliza in vitro) ne prihvaćaju se za određivanje K^+ , Mg^{2+} , LD, AST, ALT, alkalne fosfataze, CK, GGT, kolesterola, triglicerida, bilirubina ukupnih proteina
9. lipemični uzorci ne prihvaćaju se za određivanje amilaze, ukupnog kalcija, željeza, LD, ukupnih proteina, hemoglobina te K^+ i Na^+ ako se određuju plamenom fotometrijom ili indirektnom potenciometrijom.